




Comment éteindre un Newport HT70

Cette technique résume comment éteindre un respirateur artificiel Newport HT70.

Rédigé par: knipwim




Étape 1 — Éteindre le respirateur

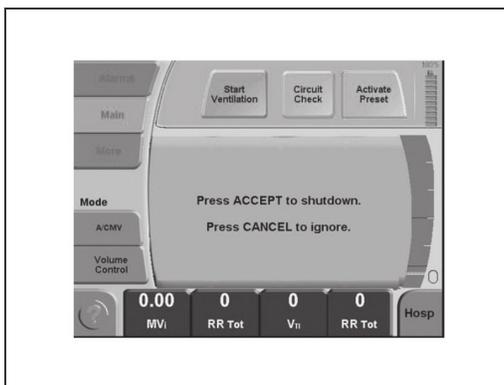

- L'interrupteur de type temporaire est situé en bas à gauche de la partie arrière du respirateur artificiel. Appuyez une fois sur l'interrupteur.
- Un message apparaît alors sur l'écran pour vous demander **Press Accept to Shutdown** (Appuyer Accepter pour éteindre) ou **Press Cancel to Ignore** (Appuyer Annuler pour ignorer).
- Appuyer sur le bouton **Accept** (accepter) éteint le respirateur.
- Appuyer **Cancel** (Annuler) revient à l'état précédent.
- Appuyer sur **Alarm Silence** (Alertes silencieuses) pour couper les alertes.

Étape 2 — Déconnecter du courant

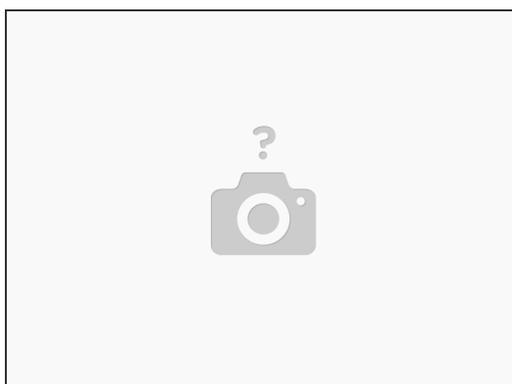

- Déconnectez le respirateur du courant électrique.