



Remplacement du support du moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex série 6000

Retirez le moniteur de signes vitaux de son support de bureau ou transférez-le vers une nouvelle tige de support sur un nouveau support.

Rédigé par: Sam Goldheart



INTRODUCTION

Utilisez ce tutorial pour retirer le moniteur de signes vitaux Welch Allyn Connex de son support de bureau.

REMARQUE : ce tutorial de réparation fut développé par l'équipe d'iFixit sur la base du guide de service de Welch Allyn. Ni iFixit, ni ce tutorial de réparation ne sont approuvés par ou affiliés à Welch Allyn.



OUTILS:

- [Flathead Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Support



- Débranchez le câble secteur.

Étape 2



- Placez votre pouce et votre index sur le connecteur du tuyau de pression artérielle (NIBP). Pincer les languettes de fixation sur le côté jusqu'à ce que le connecteur se détache.
⚠ Tenez toujours le tuyau par le connecteur. Ne tirez jamais directement sur le tuyau.
- Tirez le connecteur mâle hors du connecteur femelle.

Étape 3



- Placez votre pouce et votre index sur le connecteur du câble du moniteur de saturation en oxygène non invasif de l'hémoglobine artérielle (SpO2 ou SpO2/SpHb). Pressez les côtés du connecteur jusqu'à ce qu'il se détache.
 Tenez toujours le câble par le connecteur. Ne tirez jamais directement sur le câble.
- Tirer le connecteur mâle hors du connecteur femelle.

Étape 4



- Saisissez la sonde de température et tirez-la vers le haut afin de la retirer du moniteur.

Étape 5



- Retirer le capot du module de température en appuyant sur la languette et en faisant glisser le capot vers la droite.

Étape 6



- Appuyez sur la languette à ressort du connecteur de la sonde de température et débranchez le connecteur.

Étape 7



- Retirez la vis à tête plate du capot des ports USB.
- Déserrez la vis captive à empreinte cruciforme (Phillips #2), qui fixe le moniteur au support.

Étape 8



- En tenant le moniteur fermement, ouvrez le capot des ports USB.
- ⓘ Vous aurez peut-être besoin de soulever légèrement le moniteur pour pouvoir détacher le capot USB.

Étape 9



- Détachez tous les câbles USB connectés au moniteur.

Étape 10



- Glisser le moniteur hors de sa base de support.

Afin de réassembler votre appareil, suivez les instructions en ordre inverse.